

Mirage™ SoftGel

NÄSMASK

Inpassningsguide



- Vrid MicroFit™ ratten till position 24, så att pannstödet är helt utvidgat.



- Koppla bort det nedre clipset på huvudbandet, håll masken över näsan och dra huvudbandet över huvudet.



- Koppla tillbaka det nedre clipset på huvudbandet. Se till att det klickar in sig på rätt plats.



- Justera de övre remmarna så att de sitter jämnt. Dra inte åt för hårt.



- Justera de nedre remmarna så att de sitter bekvämt. Dra inte åt för hårt.



- Koppla luftslangens ena ände till sviveln och den andra änden till flödesgeneratorn.
- Koppla på utrustningen.



- Justera ratten så att det inte läcker vid näsan.



- Justera de nedre remmarna så att det inte läcker vid överläppen.